

Инструкции за употреба

deconex® 21 CLF

Специализиран алкален почистващ химичен препарат

За дезинфекция и стерилизация на инструменти
в машини за миене и дезинфекция
(WD)



Свойства

deconex® 21 CLF се използва в централното отделение за дезинфекция и стерилизация като почистващ химичен препарат без тензиди за автоматизирана дезинфекция и стерилизация на хирургически инструменти и анестетични материали. Те включват:

- Инструменти от неръждаема стомана (скалпели, форцепси и др.)
- Инструменти с шарнири (ножици, скоби и др.)
- Анестетични материали (респираторна торбичка, тръбички и др.)

deconex® 21 CLF нежно отстранява:

- Кръв
- Тъкани остатъци
- Протеин

Съставки/състав

- Алкален дозатор
- Комплексообразуващ агент
- Корозионен инхибитор
- Пасиватор

Препоръчителна доза

Оптималната доза зависи от твърдостта на водата и вида на замърсяването. Използването на деминерализирана вода подобрява ефективността на почистването, което позволява да се намали концентрацията.

Следните примери на дозиране се оказаха практически ефективни:

Качество на вода	Препоръчително дозирание
В деминерализирана вода	3 – 5 мл/л
В твърда вода	5 – 10 мл/л

При температура от 60 °C се препоръчва време за почистване от 2 – 5 минути.

Неутрализация

За да неутрализирате алкалните остатъци, след всяка стъпка на почистване трябва да следва изплакване с киселина. За неутрализиране на deconex® 21 CLF ние препоръчваме deconex® ORGANACID или deconex® MINERALACID.

Съвместимост с материалите

deconex® 21 CLF е подходящ за всички материали, използвани обичайно в медицинските изделия.

Може да възникне несъвместимост с алуминий и титан.

За други чувствителни материали може да се наложи да се извършат тестове за съвместимост. Свържете се с Borer Chemie AG, ако е необходимо.

deconex® 21 CLF

Химико-физични данни

рН стойност ¹⁾	прибл. 11.4
Плътност ²⁾	1.4 г/мл
Външен вид ²⁾	Прозрачен, безцветен

¹⁾ 1% разтвор в деминерализирана вода ²⁾ Koncentrát

Инструкции за безопасност и изхвърляне

Информация относно безопасността на работното място и правилното изхвърляне може да бъде намерена в информационния лист за безопасност.

При изхвърляне на празни контейнери и използван разтвор трябва да се спазват местните разпоредби относно отпадъците и отпадъчните води.

Контейнерите, уплътненията и етикетите са произведени от подлежащ на рециклиране полиетилен.

Съхранение и транспортиране

Съхранявайте продукта при температури между 5 и 25 °C.

Размери на контейнерите

Тип на опаковката	Съдържание	Номер на артикул
Ниска туба	5 л	500930.00-KK5W
Туба	10 л	500930.00-K10W
Туба	25 л	500930.00-K25W
Варел 220 л	200 л	500930.00-B220

СЕ маркировка

deconex® 21 CLF отговаря на изискванията за медицински изделия в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/745.

Дистрибутор / вносител:

Производител:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions