

# deconex® 36 BS ALKA

## Detergente intensivo alcalino

Per la pulizia manuale di strumentario e utensili medici



### Applicazione

deconex® 36 BS ALKA viene impiegato prima della sterilizzazione e del lavaggio automatico per un'accurata autopulizia di strumenti molto sporchi, in particolare di quelli in acciaio inox.

deconex® 36 BS ALKA è indicato anche per i bagni ad ultrasuoni.

### Proprietà

deconex® 36 BS ALKA rimuove da solo e senza lasciare alcun residuo anche lo sporco più ostinato come sangue, fibre di tessuto, muco e feci. Riducendo notevolmente la tensione superficiale della soluzione pulente, deconex® 36 BS ALKA riesce a inumidire completamente lo sporco e quindi a rimuoverlo efficacemente anche dalle superfici difficilmente accessibili.

L'elevato potere emulsionante e disperdente previene il ridepositarsi dello sporco rimosso.

deconex® 36 BS ALKA è privo di NTA.

### Composizione chimica

Alcali, agenti complessanti, agenti disperdenti, solubilizzanti, tensioattivi, agenti umettanti

### Dati chimico-fisici

Valore pH	soluzione all'1% in acqua demineralizzata	ca. 11.8
Densità	concentrato	1.4 g/mL
Aspetto	concentrato	liquido trasparente leggermente giallognolo

### Dosaggio

0.5-1.0% per un tempo d'azione di 2-15 min (a seconda del livello di sporco e della qualità dell'acqua)

Immergere per 5 min nel bagno ad ultrasuoni.

### Compatibilità con i materiali

Adatto per:

Acciaio inox, metalli ferrosi, materiali cromati, gomma, materie plastiche, vetro

Parzialmente compatibile con:

Alluminio anodizzato, metalli non ferrosi

Non adatto per:

Alluminio, zinco, stagno

Per i materiali non indicati deve essere eseguita un'analisi di compatibilità direttamente dal cliente o, su richiesta, da Borer Chemie AG.

# deconex® 36 BS ALKA

## Fornitura

Si informi presso il suo rappresentante sulle dimensioni delle confezioni disponibili.

Le confezioni, i tappi e le etichette sono realizzati in polietilene riciclabile.

## Marchio CE

deconex® 36 BS ALKA soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.

## Altre informazioni

Per le avvertenze riguardanti la protezione sul lavoro, lo stoccaggio e lo smaltimento/le acque residue, la preghiamo di consultare il foglio dati per la sicurezza del prodotto.

Approfitti della nostra competenza! Saremo lieti di fornirle informazioni pratiche per il suo specifico tipo d'impiego.

**Distributore / Importatore:**

**Produttore:**

**Borer Chemie AG**

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions