

deconex® 41 STS ALKA

Agente alcalino para limpeza, enxágue e descalcificação

Para uso em lavadoras/desinfetadoras com desinfecção térmica para recipientes de dejetos humanos



Aplicação

O deconex® 41 STS ALKA é usado como inibidor de cálcio e agente de limpeza e enxágue. O produto é utilizado em lavadoras/desinfetadoras com desinfecção térmica para recipientes de dejetos humanos como comadres, frascos de urina, baldes de fezes, potes de escarro e outros recipientes e utensílios de descarte.

O deconex® 41 STS ALKA é particularmente adequado para as máquinas que contêm componentes sensíveis ao ácido (p. ex., cobre, ferro fundido) e também para máquinas que dosam o produto diretamente no gerador de vapor.

Dosagem

A dosagem é feita com dispensadores instalados e é:

Dureza da água [°dH]	Dureza da água [ppm]	Dosagem
0-5 °dH	0-90 ppm	1.0 mL/L
5-10 °dH	90-180 ppm	2.0 mL/L
10-15 °dH	180-270 ppm	3.0 mL/L
15-25 °dH	270-450 ppm	4.0 mL/L
> 25 °dH	> 450 ppm	5.0 mL/L

Informações sobre a utilização

Enxágue abundantemente as linhas de sucção antes de trocar o produto.

Propriedades

O deconex® 41 STS ALKA evita a formação de depósitos em itens a serem limpos, paredes de máquinas, em bicos e tubos. O produto alcalino suave também evita a formação de incrustações na caldeira no gerador de vapor.

Ingredientes

Agente complexante, inibidor de corrosão

Relatórios periciais

Como parte de um relatório pericial, o deconex® 41 STS ALKA foi testado com êxito de acordo com ISO 15883-3. A redução de *C. difficile* em mais de 4 níveis de Ig também foi demonstrada.

Compatibilidade com materiais

Adequado para:
Aço inoxidável, cobre, ferro fundido, plásticos, vidro

Não adequado para:
Alumínio

Para materiais não mencionados, faça seus próprios testes de compatibilidade específicos ou consulte a Borer Chemie AG.

deconex® 41 STS ALKA

Dados físico-químicos

Valor do pH	Solução a 1% em água desmineralizada	aprox. 11.1
Densidade	concentrado	1.12 g/mL
Aparência	concentrado	transparente, incolor a amarelo

Disponibilidade

Converse com o representante local sobre os tamanhos de recipiente atuais.

Recipientes, tampas roscadas e etiquetas são feitos de polietileno reciclável.

Armazenamento e transporte

Armazene o produto a temperaturas entre 5 e 25 °C.

Este dispositivo médico é sensível à geada. Sempre que possível evite o transporte deste produto durante os períodos frios. Se o transporte durante esses períodos for inevitável, este produto deverá ser enviado usando caminhão / contêiner marítimo com temperatura controlada acima de 5 °C, ou usar capas de proteção térmica para transportes de curta duração não superiores a 10 horas com temperaturas de transporte não inferiores 5 °C negativos.

Marcação CE

O deconex® 41 STS ALKA atende aos requisitos para dispositivos médicos de acordo com o Regulamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.

Informações adicionais

Para obter informações sobre segurança no trabalho, armazenamento e descarte/efluente de resíduos, consulte a folha de dados de segurança correspondente.

Aproveite o nosso amplo conhecimento! Entre em contato conosco para obter mais informações sobre sua aplicação específica.

Distribuidor / importador:

Fabricante:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions