

# deconex® 42 KONZ

## Lubrifiant pour la protection des instruments

Pour l'utilisation dans des machines à laver spéciales



### Application

deconex® 42 KONZ s'utilise dans le dernier rinçage à une température de 50 °C au moins lors du traitement des dispositifs médicaux, chirurgicaux en machines.

### Propriétés

deconex® 42 KONZ est un produit à base de paraffine liquide médicinale et d'émulsifiants. Il forme avec de l'eau une émulsion homogène. Grâce à sa composition, le produit est particulièrement indiqué pour l'entretien de base des instruments avant la stérilisation. En formant une mince couche, les surfaces en acier inox sont protégées de la corrosion de contact (les charnières, les articulations).

deconex® 42 KONZ ne devient pas résineux pendant la stérilisation. Dans la très mince couche qui reste sur les surfaces des instruments, il n'y a aucune possibilité pour une croissance microbienne. La couche de protection du deconex® 42 KONZ sera être complètement rejetée lors du prochain cycle. Cela signifie que le lubrifiant doit être utilisé lors de chaque cycle.

### Composants

Paraffine liquide médicinale, émulsifiants

### Dosage

0.5-1 mL/L par charge

### Données chimiques/physiques

Valeur pH	1% dans de l'eau déminéralisée	env. 5.0-7.5
Densité	concentré	0.86 g/mL
Aspect	concentré	un liquid transparent, incolore à faiblement jaunâtre

### Information d'utilisation

Pour obtenir une couche régulière sur les surfaces en acier inox, la température de rinçage devrait être de 50 °C au moins pour l'application du deconex® 42 KONZ.

En outre, nous vous recommandons:

- un chargement correct des pièces à laver dans les tamis et dans les machines (éviter un surchargement)
- de vérifier que toutes les pièces à laver sont en contact avec la solution de nettoyage pendant le processus
- d'ouvrir tous les instruments articulés

Avant d'utiliser deconex® 42 KONZ, vérifier que le système de dosage de la machine à laver est résistant à l'huile. Ne pas traiter les ustensiles d'anesthésie avec deconex® 42 KONZ.

deconex® 42 KONZ ne convient pas à des bains d'immersion.

### Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour:  
L'acier inox

N'est pas compatible avec:  
Le caoutchouc, le latex

Pour les matériaux non-mentionnés ci-dessus, une analyse de compatibilité est à effectuer ou adressez-vous à Borer Chemie AG.

# deconex® 42 KONZ

## Emballage

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont faits en polyéthylène recyclable.

## Tailles de récipient

Type du récipient	Capacité	Référence article
Bouteille	1 L	504000.00-F10W
Bidon bas	5 L	504000.00-KK5W
Bidon	10 L	504000.00-K10W
Bidon	25 L	504000.00-K25W
220 L fût	200 L	504005.00-B220

## Marquage CE

deconex® 42 KONZ respecte les exigences posées aux dispositifs médicaux par le Règlement (UE) 2017/745.

## Informations supplémentaires

Pour des informations concernant la protection de travail, stockage et l'élimination/eaux résiduelles veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N'hésitez pas à nous consulter pour toute information pratique relative à votre application spécifique.

**Distributeur / importateur :**

**Manufacture:**

**Borer Chemie AG**

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions