

deconex® 42 KONZ

Смазочное средство для обработки инструментов

Предназначено для применения в специальных моющих машинах



Применение

Смазочное средство deconex® 42 KONZ используется на последней стадии ополаскивания во время обработки хирургических инструментов при температуре не менее 50 °C

Свойства

deconex® 42 KONZ представляет собой средство на основе медицинского белого масла и эмульгаторов. При смешивании с водой образуется однородная эмульсия. Благодаря своему составу средство пригодно для обработки инструментов перед стерилизацией. Средство формирует тонкую защитную пленку на поверхности инструментов из нержавеющей стали для предохранения от коррозионного изнашивания (петли и шарнирные соединения).

Средство deconex® 42 KONZ не загустевает во время стерилизации. Очень тонкая пленка на поверхности инструментов исключает возможность развития микроорганизмов. Во время следующего цикла защитная пленка deconex® 42 KONZ полностью смывается. Это означает, что смазочное средство должно использоваться при каждой обработке.

Состав

Медицинское белое масло, эмульгаторы

Дозировка

0.5-1 мл/л моющей жидкости

Химико-физические данные

рН	1 % в деминерализованной воде	прибл. 5.0-7.5
Плотность	концентрата	0.86 г/мл
Внешний вид	концентрата	прозрачный, жидкость - от бесцветного до желтоватого цвета

Указания по применению

Для создания равномерной пленки на поверхности из нержавеющей стали температура ополаскивания должна быть не менее 50 °C для нанесения средства deconex® 42 KONZ.

Кроме того, мы рекомендуем выполнить следующие инструкции:

- обеспечьте правильную загрузку инструмента на стойки и в оборудование (не допускайте перегрузки),
- убедитесь, что на все инструменты попадает смазочное средство перед стадией ополаскивания и
- откройте все инструменты с петлями и шарнирными соединениями.

Перед применением средства deconex® 42 KONZ убедитесь, что компоненты системы дозирования моющей машины являются маслостойкими. Запрещается обрабатывать инструменты для анестезии средством deconex® 42 KONZ.

Средство deconex® 42 KONZ не пригодно для замачивающих ванн.

Совместимость с материалами

Средство пригодно для обработки следующих материалов:
Нержавеющая сталь

Средство не пригодно для обработки следующих материалов:
Резина, латекс

Для уточнения информации по материалам, не указанным в списке, рекомендуется провести собственные тесты на совместимость или проконсультироваться с Borer Chemie AG.

deconex® 42 KONZ

Упаковка

Контейнеры, навинчивающиеся пробки и этикетки изготавливаются из подлежащего вторичной переработке полиэтилена.

Размеры емкости

Тип упаковки	Объем	Номер изделия
Бутылка	1 Л	504000.00-F10W
Канистра, глубокая	5 Л	504000.00-KK5W
Канистра	10 Л	504000.00-K10W
Канистра	25 Л	504000.00-K25W
Бочка на 220 Л	200 Л	504005.00-B220

Маркировка CE

deconex® 42 KONZ соответствует требованиям к продукции медицинского назначения согласно Регламенту о продукции медицинского назначения (ЕС) 2017/745.

Дополнительная информация

Для получения информации о безопасности при работе, хранении и переработке отходов/жидких отходов обратитесь к соответствующему листу с данными по безопасности.

Воспользуйтесь нашим «ноу-хау»! Обращайтесь к нам за дополнительной информацией об особенностях применения.

Дистрибьютор/импортер:

Производитель:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions