

Brugsanvisning

deconex® 61 DR

Desinfektionsvaskemidlet til automatiseret genbehandling af senge og beholdere - pH-neutral



Tilsløbet anvendelse

Til automatiseret rengøring og afsluttende, kemisk desinfektion af ikke-invasivt, ikke-kritisk, termolabilt, medicinsk udstyr (f.eks. patientsenge) og tilbehør i kabinetvaskere. Baktericid, levorucid, virksomt over for vækst af vira (begrænset virucidal).

Til professionel brug.

Anvendelse

deconex® 61 DR leveres som koncentrat. Oplysninger om procesparametre såsom forskylning kan findes i specifikationerne fra producenten af de store vaskesystemer.

Anbefalet dosering:

5 - 8 mL/L

Anbefalet brug:

Kontaktid mindst 180 s
ved en temperatur på ≥ 60 °C

Effektivitet

Virkningsspektrum og Metode	Koncentration	Kontaktid	Temperatur
Bakteriedræbende virkning EN 13727, EN 14561	0.5 % / 0.8 %*	3 min	60 °C
Svampedræbende virkning EN 13624, EN 14562	0.5 %	3 min	60 °C
Virucid effekt mod vækst af vira (begrænset virucidal) EN 14476, EN 17111	0.5 %	3 min	60 °C

* i overensstemmelse med EN 14561:2006 med termotolerant testorganisme *Enterococcus faecium*

Egenskaber

- pH-neutral brugsopløsning
- exceptionel materialekompatibilitet
- lav skummeeffekt

Sikkerhedsoplysninger

Se dataarket til deconex® 61 DR for at få oplysninger om industriel sikkerhed og korrekt bortskaffelse.

Opbevaring

Opbevar produktet ved temperaturer på mellem 5 og 25°C.

deconex® 61 DR

Ingredienser

100 g deconex® 61 DR indeholder:

6.0 g glyoxal

2.3 g dioctyl-dimethyl-ammoniumchlorid

Hjælpestoffer:

Alkoholbaseret opløsningsmiddel, overfladeaktive sammensætninger, korrosionsbeskyttelse

Materialekompatibilitet

Egnet til:

Rustfrit stål, ædle metaller, jern, aluminium, glas, keramik, porcelæn, syntetisk harpiks, plast med undtagelse af polycarbonat, polystyren og polysulfon, i begrænset grad egnet til akrylglas.

Brugeren bør udføre relevante kompatibilitetstests for materialer, der ikke er anført her, eller kontakte Borer Chemie AG.

Fysisk-kemiske data

pH	1 % opløsning i vandværksvand	ca. 7.4
Densitet	koncentrat	1.00 g/mL
Udseende	koncentrat	transparent, farveløs til gul

Emballering og bortskaffelse

Beholderen, tætningerne og etiketterne er fremstillet af genanvendelig polyethylen.

Ved bortskaffelse af de tomme beholdere og arbejdsopløsningen skal de lokale forskrifter for affald og spildevand overholdes.

Tilgængelighed

Kontakt den lokale forhandler af deconex®-produkter vedrørende tilgængelige beholderstørrelser.

Yderligere oplysninger

Læs brugsanvisningen og det relevante sikkerhedsdataark før brug af produktet.

Kontakt os for at få flere oplysninger vedrørende din specifikke anvendelse.

Distributør / importør:

Producent:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss



advanced cleaning solutions