

Упутство за употребу

deconex® 61 DR

Детерџент за дезинфекцију

За употребу у машинама за прање и дезинфекцију са великим коморама



Опсег примене

deconex® 61 DR је детерџент за дезинфекцију који се користи за поновну обраду медицинских уређаја, као што су операциони столови и посуде, у машинама за прање и дезинфекцију са великим коморама.

Примена

deconex® 61 DR је дизајниран за истовремено чишћење и дезинфекцију у машинама за прање и дезинфекцију са великим коморама.

Препоручена доза:

5—10 mL/L

Препоручена употреба:

Време контакта од најмање 90 секунди на температури од ≥ 60 °C

Својства

- одлична антимикуробна ефикасност
- рН-неутралан раствор за употребу
- изузетна компатибилност са материјалима
- слабо стварање пене
- дизајниран за употребу у комбинацији са deconex® 64 NEUTRADRY као средством за испирање

Безбедносне информације

Погледајте deconex® 61 DR безбедносни лист за информације о индустријској безбедности и правилном одлагању.

Складиштење

Чувајте производ на температурама између 5 °C и 25 °C.

deconex® 61 DR

Ефикасност

Спектар деловања	Метод	Концентрација	Време контакта
Бактерицидна и левуроцидна активност	EN 13727 / 60 °C	0.5 %	3 минуте
	EN 13624 / 60 °C	0.5 %	1.5 минута
Ограничена вируцидна активност: Активан против вируса са омотачем ХБВ, ХЦВ, ХИВ и инфлуенце	EN 14476 / 60 °C (ВВДГ и Vaccinia)	0.5 %	3 минуте
		1 %	1.5 минута

Дистрибутер / увозник:

Произвођач:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



Лист са подацима о производу

deconex® 61 DR

Детерџент за дезинфекцију

За употребу у машинама за прање и дезинфекцију са великим коморама



Састојци

100 g deconex® 61 DR садржи:

6.0 g глиоксиала

2.3 g диоктил диметил амонијум хлорида

Помоћне супстанце:

Растварач на бази алкохола, површински активна једињења, заштита од корозије

Усклађеност са материјалима

Пгодно за:

Нерђајући челик, племенитр металр, гвожђе, алуминијум, стакло, керамику, порцелан, синтетичку смолу, пластику са изузетком поликарбоната, полистирола и полисулфона, погодно у ограниченој мери за акрилно стакло.

Корисник треба да спроведе одговарајуће тестове компатибилности за материјале који нису овде наведени или да се обрати компанији Borer Chemie AG.

Извештаји стручњака

deconex® 61 DR је испитан у складу са EN/ISO стандардима у погледу његове ефикасности. Извештаји стручњака су доступни на захтев.

Пгодно средство deconex® 61 DR за дезинфекцију и чишћење кревета и ноћних ормарића у комори за аутоматску деконтаминацију је такође документована у стручним извештајима.

Ознака CE

deconex® 61 DR испуњава захтеве за медицинска средства у складу са уредбом 93/42/EEC.

deconex® 61 DR

Физичко-хемијски подаци

рН	1% раствор у води из славине	приближно 7.4
Густина	концентрата	1.00 g/mL
Изглед	концентрата	провидан, безбојан до жут

Паковање и одлагање

Посуда, поклопци и етикете су произведени од полиетилена који се може рециклирати.

Приликом одлагања празних посуда и раствора за примену, морају се поштовати локални прописи о отпаду и отпадним водама.

Додатне информације

Пре коришћења производа прочитајте упутства за употребу и одговарајући безбедносно-технички лист.

Искористите наше знање! Обратите нам се за додатне информације у вези са вашом специфичном применом.

Величине посуда

Врста посуда	Садржај	Број артикла
Канистер ниски	5 L	505615.00-KK5W
Канистер	10 L	505615.00-K10W
Канистер	25 L	505615.00-K25W
220 L буре	200 L	505615.00-B220
Посуда у облику контејнера	200 L	505600.00-D220

Дистрибутер / увозник:

Произвођач:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

