

deconex® 64 NEUTRADRY

Biyolojik uyumlu, nötr durulama ve kurutma yardımcı maddesi

Medikal aletlerin ve takımların yıkama makinesinde-dezenfeksiyon makinesinde (YD) yıkanması için



Uygulama

deconex® 64 NEUTRADRY, medikal aletlerin ve takımların yıkama makinelerinde durulanmasına ve kurutulmasına yardımcı madde olarak kullanılır. Genellikle termal dezenfeksiyon için de (80-93 °C) kullanılan son durulama suyuna belirli dozda eklenir.

Özellikleri

deconex® 64 NEUTRADRY

- suyun yüzey gerilimini azaltır,
- kurutma sürecini %50'ye varan oranda kısaltır,
- biyolojik uyumludur ve buna uygun sertifikaya sahiptir,
- pH nötrdür,
- çok hafif yağlama etkisi vardır (bağlantı yerlerinde).

İçerik

Süpfaktanlar, organik asitler, koruyucu

Kimyasa/fiziksel özellikler

pH değeri	demineralize suda %1'lik solüsyon	yaklaşık 7.9
Yoğunluk	konsantre	1.01 g/mL
Görünüm	konsantre	şeffaf, renksiz ya da hafif sarımtırak

Dozaj

0.3-1.0 mL/L (suyun kalitesine bağlı olarak)

Kullanım bilgileri

Termal dezenfeksiyon/son durulama için mutlaka deiyonize su kullanılmalıdır.

Malzeme uyumu

Bu ürün çok çeşitli malzemelerle uyumludur. Ancak aşağıda belirtilen hususlar mutlaka dikkate alınmalıdır:

Polisülfon (PSU) malzemeden imal edilen anestezi araçları için kullanılan aksesuarlar ile larniks maske ve valf konektörleri ile cihaz kaplarının kapak adaptörleri ve parçaları gibi polifenil sülfon (PPSU) malzemeden üretilen aksesuarlar, durulama yardımcı maddesiyle temas etmeleri halinde üretimle ilgili stres çatlaklarına maruz kalabilir. Bu parçaların önce uyumluluğunun test edilmesi gerekmektedir.

deconex® 64 NEUTRADRY

Tedarik bilgiler

Mevcut ambalaj boyutlarını size en yakın yetkili satıcıdan öğrenebilirsiniz.

Ambalajlar, vidalı kapaklar ve etiketler geri dönüşebilir polietilenden üretilmiştir.

Saklama ve taşıma

Ürünü 5 ile 25 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.

Bu tıbbi cihaz donmaya karşı duyarlıdır. Mümkün olduğu müddetçe bu ürünü soğuk havalarda taşımaktan kaçının. Bu tür dönemlerde taşıma işlemi kaçınılmaz ise bu ürün 5 °C derecenin üzerinde sıcaklık kontrollü bir yük arabasında/deniz konteynerinde sevk edilmeli ya da eksi 5 °C derecenin altına düşmeyen sıcaklıklarda 10 saati aşmayan kısa süreli taşıma işleri için koruyucu örtüler kullanılmalıdır.

CE işareti

deconex® 64 NEUTRADRY, (AB) 2017/745 düzenlemesi ile uyumlu olarak tıbbi cihazlara yönelik gereklilikleri karşılar.

Ek bilgiler

Çalışma güvenliği, saklama ve atma/atıklar hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili güvenlik bilgilerinden faydalanın.

Sahip olduğumuz kapsamlı deneyimden yararlanın! Özel uygulamalarınızla ilgili bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçin.

Distribütör / ithalatçı:

Üretici:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions