

Упатства за употреба

deconex® INSTRUMENT PLUS

Хемија за чистење на медицински помагала со ефект на дезинфекција

За рачно пред-чистење/чистење и дезинфекција на медицински помагала што може повторно да се обработат и финална дезинфекција на некритични медицински помагала



Опсег на примена

deconex® INSTRUMENT PLUS се користи разреден за рачно претходно чистење и дезинфекција на репроцесибилни термостабилни и термолабилни инвазивни и неинвазивни медицински уреди и додатоци за потопување или ултразвучна бања. Хируршки и одделенски инструменти, минимално инвазивни хируршки (MIS) инструменти (вклучувајќи инструменти Da Vinci), стоматолошки инструменти и флексибилни ендоскопи, меѓу другото, може да се обработуваат повторно.

deconex® INSTRUMENT PLUS може да се користи и за рачна финална дезинфекција на неинвазивни медицински помагала.

Својства

deconex® INSTRUMENT PLUS комбинира чистење и дезинфекција за рачна обработка на медицински инструменти и ги покажува следните својства:

- Одлични перформанси за чистење, дури и со коагулирана крв (фибрин) благодарение на неговата специјална, ензимска формулација
- Заштита на персоналот и работната средина
- Спектар на дејство: бактерицидно, левуроцидно, ограничено вируцидно
- Добрата материјална компатибилност овозможува користење за третман на широк спектар на медицински помагала, вкл. флексибилни ендоскопи
- Пријатна арома

Ефикасност за дезинфекција

Спектар на дејство и методологија	Концентрација	Време на контакт
Бактерицидно (EN 13727, EN 14561)	0.5%	5 мин
Квасно (EN 13624, EN 14562)	0.5% 1%	15 мин 5 мин
Активен против обвиени вируси Тест на суспензија (EN 14476)	1%	5 мин
Тест за носител на микроби (EN 17111)	1.5% 2%	30 мин 15 мин

Тестот беше спроведен со вода со стандардизирана тврдина (30 °fH или 16.9 °dH / 300 ppm) и големо оптоварување.

Примена и дозирање

Најефективната доза на deconex® INSTRUMENT PLUS е под влијание на различни фактори, како што се видот и количината на извалканост.

deconex® INSTRUMENT PLUS се користи како разреден раствор со вода од чешма, омекната или деминерализирана вода на собна температура. Минималната концентрација и времето на контакт мора да се приспособат на барањата за чистење. За ефикасноста на дезинфекцијата, видете го соодветниот дел од овој документ. Доколку е можно, проверете дали инструментите се потопени расклопени и целосно намокрени.

Метод на потопна бања:

По потребното време за контакт, четкајте доколку е потребно.

deconex® INSTRUMENT PLUS

Ултразвучна бања:

Откако ќе истече времето на изложување, оставете ги инструментите во бањата додека не се достигне потребното време за контакт.

Инструментите мора да се исплакнат доволно; Последниот чекор на плакнење идеално треба да се изврши со деминерализирана вода, но сепак доволна е достапната вода со најдобар квалитет.

Финална дезинфекција: Користете само на исчистени инструменти и во свеж раствор. Исплакнете ги инструментите со деминерализирана вода без микробна/ниско-бактериска вода.

Искористениот раствор на deconex® INSTRUMENT PLUS треба да се заменува секојдневно. Видливо контаминираниот раствор за апликација треба веднаш да се отстрани и замени.

deconex® INSTRUMENT PLUS може да се користи во уреди за дозирање. Мора да се внимава за да се избегне микробиолошка контаминација.

Производите што содржат алдеhid не треба да се користат пред и по повторна обработка со deconex® INSTRUMENT PLUS.

Компатибилност со материјалите

deconex® INSTRUMENT PLUS е погоден за нерѓосувачки челик, (анодизиран) алуминиум, титаниум, обоени метали, полиамид (PA), полиетилен (PE), поливинил хлорид (PCV), полиоксиметилен (POM), полиетеримид (PEI), полифенилсулфон (PPSU), полиетеретеркетон (PEEK), политетрафлуороетилен (PTFE).

Акрилното стакло (PMMA) и полисулфонот (PSU) може да се некомпатибилни.

Не е погоден за поликарбонат (PC).

За други чувствителни материјали, можеби ќе треба да се спроведат тестови за компатибилност. Доколку е потребно, контактирајте директно со вашиот локален дистрибутер на производите deconex® или Borer Chemie AG.

Хемиски/физички податоци

рН вредност 1 % раствор	
во деминерализирана вода	прибл. 8.3
во вода од градски водовод ¹⁾	прибл. 7.7
Густина на концентрат	1.0 г/мл
Изглед на концентратот	јасна, сина

¹⁾ мерено во вода од градски водовод на 25 – 28 °fH / 14 – 16 °dH / 250 – 280 ppm CaCO₃

Составни делови

100 г deconex® INSTRUMENT PLUS содржи:
11.2 г N,N-дидецил-N-метил-поли(оксиетил) амониум пропионат
11.7 г N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1.3-диамин

Помошни состојки:

Ензими (протеаза), површински активни супстанции, парфем, боја

Внимание

Не користете за финална дезинфекција на инвазивни медицински помагала. ▪ Не мешајте со други производи. ▪ Контактирајте со вашиот локален дистрибутер за deconex® производи или Borer Chemie AG пред да ја промените хемијата за употреба. ▪ Производот е само за еднократна употреба, а не за повторна употреба. ▪ Мора да се почитуваат законските барања и барањата поврзани со стандардите за медицински помагала. ▪ Само за професионална употреба. ▪ Почитувајте ги упатствата за повторна обработка на медицинските помагала што треба да се третираат и упатствата за употреба на опремата што се користи за повторна обработка.

Доколку се случи сериозен инцидент со овој производ, мора да се пријави кај производителот и кај одговорниот орган.



deconex® INSTRUMENT PLUS

Инструкции за безбедност и отстранување

Информациите за безбедноста на работното место и правилното фрлање на неискористениот производ може да се најдат на безбедносниот лист со податоци.

Кога се фрлаат празни садови и искористен раствор, мора да се почитуваат локалните прописи за отпад и отпадни води.

Садовите, заптивките и етикетите се направени од полиетилен што може да се рециклира.

Складирање и транспорт

Чувајте го производот на температури меѓу 5 и 25 °C.

Ознака CE

deconex® INSTRUMENT PLUS ги исполнува барањата за медицински производи во согласност со Директивата за медицински производи 93/42/ЕЕЗ.

Достапност

Контактирајте со вашиот локален дистрибутер на производите deconex® за достапните големини на садови.

Дистрибутер/увозник:

Производител:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions