## إرشادات الاستخدام



## deconex® LUBE SPRAY

منتج عناية للأدوات الجراحية

للعناية اليدوية بالأجهزة المفصلية

### التوافق مع المواد

المنتج deconex® LUBE SPRAY مناسب لجميع المعادن التي يتم استخدامها بكثرة في الأجهزة الطبية.

قد يوجد عدم توافق مع أنواع البلاستيك اعتمادًا على نوع البلاستيك.

بالنسبة للمواد الحساسة، قد يتعين عليك إجراء اختبارات للتوافق. اتصل بشركة Contact Borer Chemie AG إذا لزم الأمر.

## البيانات الكيميائية-الفيزيائية

рН	متعادل
الكثافة	0.85 جم/مليلتر
المظهر	عديم اللون

#### الخصائص

المنتج LUBE SPRAY @deconex عالي الجودة لعناية بالأجهزة الجودة للعناية بالأدوات في شكل رذاذ مصمم للعناية اليدوية بالأجهزة الجراحية ذات المفاصل والأسطح المنزلقة الأخرى والوصلات اللولبية والأقفال، والأجزاء المتحركة الأخرى مثل القامطات، والملاقط، والمقصات، والخرامات، وحاملات الإبر، والساحبات، وأدوات الربط، المقابض وكذلك المقابض منعكسة الزاوية، ويوضع بعد التنظيف الدقيق والتطهير وقبل التعقيم بالبخار.

المنتج deconex® LUBE SPRAY عبارة عن منتج يقوم حصريًا على الزيت الأبيض الطبي و هو خالٍ من أي نوع من المواد الإضافية المسببة للحساسية. ويترك المنتج deconex® LUBE SPRAY طبقة خفيفة على الأسطح التي تتم معالجتها به لمنع الاحتكاك بين الأسطح المعدنية بشكل فعال لحماية الأدوات المفصلية من التأكل الناتج عن الاحتكاك والصدأ والتشويه والتلطيخ والتأكل المبكر للأدوات.

ولقد ثبت أن الزيت الأبيض المتبقي على الأداة قابل للنفاد بالبخار ومتوافق مع التعقيم بالبخار، فضلاً عن كونه آمنًا من الناحية السمية وفقًا لقانون الأدوية والغذاء.

#### المكونات / التركيبة

- زيت أبيض طبي (مواصفة الأدوية الأوروبية)
  - مادة الدفع بروبان، بيوتان

### الاستخدام والجرعة

للعناية الصحيحة بالأجهزة، بعد التنظيف الدقيق والتطهير، يجب تبريد الأدوات إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضع المادة، وذلك لتجنب تآكل المعدن وتضرر الأسطح بفعل حركة الأجزاء.

قبل استخدام deconex® LUBE SPRAY، يجب أن تكون الأدوات جافة تمامًا.

قم برش الوصلات والمفصلات والأسطح المنزلقة بالمنتج CLUBE لفترة وجيزة مع انتقاء أقصر مسافة ممكنة باستخدام إحدى ملحقات الرش المرفقة. تجنب تكون الرذاذ، ولا تستنشق الهباء الجوي. حافظ على علبة الرش في وضع رأسي قدر الإمكان عند الرش. تعمل الحركة اللاحقة للوصلات والأسطح الاتزلاقية والأجزاء المتحركة الأخرى على تحسين توزيع مادة التزييت. يجب إزالة الزيت الزائد قبل التعقيم باستخدام قطعة قماش نظيفة وجديدة.



# deconex® LUBE SPRAY

#### علامة CE

المنتَج deconex® LUBE SPRAY يفي بمتطلبات الأجهزة الطبية بما يتوافق مع اللائحة (EU) ٧٤٥/٢٠١٧.

توجد إصدارات بلغات أخرى لنصوص الملصقات على موقع الإنترنت: //:http:// /www.borer.ch/produkte/borer-medical/deconex-lube-spray

#### تعليمات الأمان والتخلص من النفايات

المعلومات المتعلقة بالأمان في مكان العمل والتخلص من النفايات بالشكل الصحيح توجد في نشرة بيانات الأمان.

تجنب تكوين الهباء الجوي ، لا تستنشق الهباء الجوي.

عند التخلص من الحاويات الفارغة، يجب اتباع اللوائح المحلية للنفايات ومياه الصرف.

العلبة مصنوعة من الألومنيوم القابل لإعادة التدوير.

#### التحزين والنقل

قم بتخزين المنتج في درجات حرارة تتراوح بين ٥ و٢٥ درجة مئوية.

احرص على حماية المنتج من أشعة الشمس المباشرة

والابتعاد عن مصادر الحرارة والاشتعال.

#### أحجام الحاويات

الموزع / المستورد:

رقم المنتج	المحتوي	نوع الحاوية
صندوق به ٦ علب رش	۲۰۰ x ملیلتر	520900.00-CA06

يتم توريد ملحقتين للرش بأطوال مختلفة مع كل علبة، ويمكن تقصير هما إذا لزم الأمر.

الشركة المصنعة

**Borer Chemie AG** 

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90 office@borer.ch, www.borer.ch



