

(RO) Spray lubrifiant pentru instrumente

Pentru întreținerea manuală a instrumentelor chirurgicale din oțel inoxidabil cu articulații, înainte de sterilizare. Biocompatibil și permeabil la vapori (sterilizare)

Aplicare: A se aplica pe instrumente curate. Desfaceți instrumentul și pulverizați spre zona articulației. Numai pentru uz profesional. Consultați instrucțiunile de utilizare!

Conține ulei alb medicinal conform Ph. Eur.

Pericol! Componentă periculoasă: ULEIURI PARAFINICE, PROPAN, BUTAN

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. Poate fi fatal dacă este ingerat și pătrunde în căile respiratorii.

A se feri de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. NU provocați vomă. A se păstra sub cheie. A se proteja de lumina soarelui. A nu se expune la temperaturi mai mari de 50 °C/122 °F.

Pentru etichete în alte limbi ale produsului, vizitați site-ul nostru web:

<http://www.borer.ch/produkte/borer-medical/deconex-lube-spray/>



200 mL e



Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil, Switzerland, Telefon +41 32 686 56 00 / www.borer.swiss

Axxos GmbH

Im Sägenloh 3, D-78333 Stockach

Swiss made



UFI

Y800-P0UN-900R-TPEN




a se vedea partea de jos
see bottom

REF

520900.00-AE02

LOT

a se vedea partea de jos
see bottom

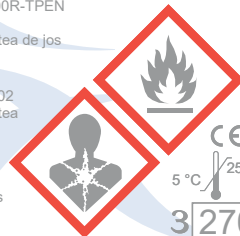

CE MD
5 °C 25 °C
3 270